



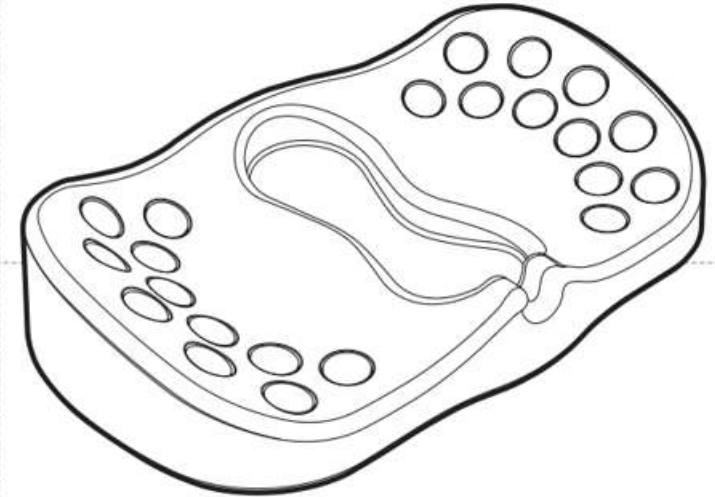

НУГА БЕСТ
www.nuga.kr

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

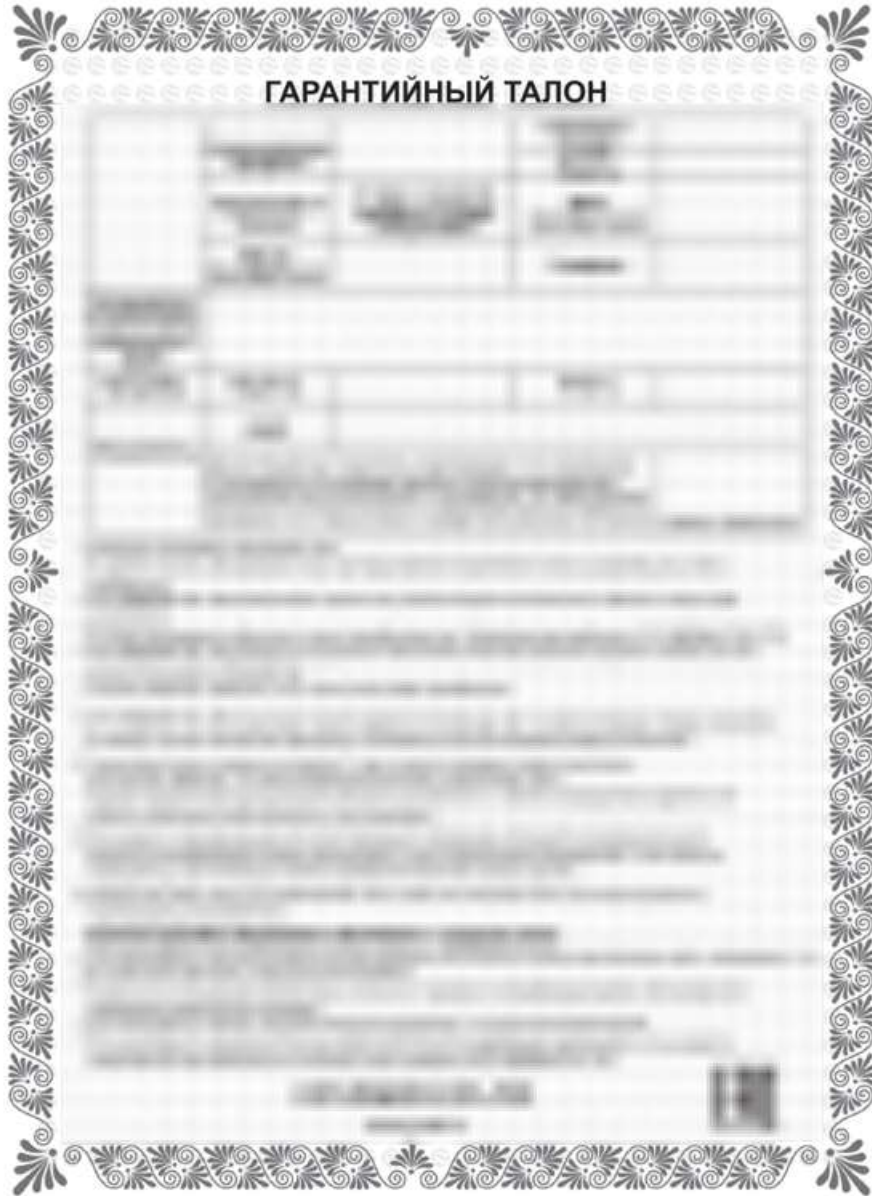

Сидушка, модель **T2**



Руководство пользователя

Благодарим за покупку!

Перед использованием полностью прочтите данное руководство и ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации изделия.

Гарантийный талон прилагается

Продукт NDT

Наименование и тип изделия	Сидушка, модель T2	Производитель	Нуга Медикал Ко., Лтд. 185, Джиреул-ро, Джиджесон-мэон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея ТЕЛ.: +82-33-730-0001 / ФАКС: +82-33-730-0007
Вес изделия	1 кг	Страна-изготовитель	Сделано в Республике Корея
Технические характеристики	420 x 260 x 85 мм	Срок службы	2 года
Импортер			

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте содержание данного раздела руководства.
- Указанная информация необходима для безопасности пользователя и предотвращения имущественного ущерба.

Примечания

- Производитель, импортер и дистрибьютор не несут ответственности за неисправности продукта или другой ущерб, возникший в результате неосторожного использования пользователем.
- Информация в руководстве пользователя подготовлена на основе текущих спецификаций продукта.
- Содержание руководства пользователя и продукта может отличаться.
- Производитель продукта продолжает добавлять новые функции и будет внедрять новые технологии в будущем.
- Все характеристики и функции продукта могут быть изменены с целью повышения производительности без предварительного уведомления пользователей.

⚠ Предупреждение

- 1 Не складывайте перед использованием.
(Это может привести к повреждению продукта.)
- 2 Не допускайте использование оборудования несовершеннолетними детьми без присмотра взрослого.
- 3 Не используйте для каких-либо целей, кроме заявленных.
(Это может привести к повреждению продукта.)
- 4 Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы, такие как свечи, сигареты, алкоголь и т. п., а также сосуды с водой и другие тяжелые предметы сверху на продукт.
(Это может привести к повреждению продукта или возгоранию.)
- 5 Не стирать и не подвергать химической чистке.
(Это может привести к повреждению продукта.)
- 6 Не протирайте продукт бензолом и т.п.
(Может вызвать изменение цвета, коррозию поверхности.)

⚠ Внимание

- 1 Строго соблюдайте инструкции по использованию
- 2 **Не протыкайте изделие и не вставляйте булавки, провода или металлические детали в изделие.**
(Это может привести к повреждению продукта.)
- 3 Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
(Это может привести к повреждению продукта.)



- 1 Перед использованием наденьте на ручной проектор чехол, чтобы он не соприкасался с кожей.



- 2 Вставьте ручной проектор в изделие и подключите к сети электропитания.

Способ использования **T2** сидушки

✳Данный продукт рекомендуется использовать только совместно с ручным проектором Нуга Бест, модель ТК-09. При использовании для других целей стабильность может быть нарушена.



- 3 Сядьте, оперевшись на изделие только седалищной костью таза, а не всем бедром.

Назначение

Сидушка для поддержания осанки (далее «Сидушка») предназначена для совместного использования с Ручным проектором торговой марки «Нуга Бест», модель ТК-09. Сидушка обеспечивает больше комфорта при использовании ручного проектора ТК-09 и помогает в поддержании правильной осанки во время использования изделия за счёт его наклонной формы. Поддержание правильной осанки способствует предотвращению искривления осанки, усталости спины и болей в крестцовом отделе позвоночника. Продукт не является медицинским изделием.

i Указание

1. Условия хранения :
 - 1 Хранить в сухом помещении, удаленном от источников воды и влажности.
 - 2 Изделие должно быть защищено от вибрации, ударов, падений и т.п.
 - 3 Запрещается устанавливать в местах хранения химических веществ, образования газа и т.п.
 - 4 Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
2. Комплектующие хранить в чистом месте.
3. При обнаружении неисправности обратитесь к продавцу

Требования к окружающим условиям / Правила ухода за изделием

- Хранить при температуре: -25~70°C; влажность: 20~80%.
- Правила ухода за изделием: Протирать сухой ветошью легкими движениями